

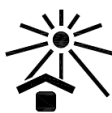


Melet Schloesing Pharmaceuticals | Rue du Collège 90 | CH-2300 La-Chaux-de-Fonds | Suisse

Instrucciones de uso

RINSE®

Explicación de símbolos

	Catálogo de referencia
	Fecha de caducidad
	Número de lote
	fabricante
	Consulte las instrucciones de uso
	Cumplimiento de la Directiva Europea 98/79 / CE
	Cuando está seguido de " ADVERTENCIA ", este símbolo significa "¡Atención! De lo contrario, pueden producirse resultados erróneos de examen y / o degradación del dispositivo. "
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Proteger del sol
	Mantener alejado de la humedad
	Límites de temperatura (inferior y superior)



Melet Schloesing Pharmaceuticals | Rue du Collège 90 | CH-2300 La-Chaux-de-Fonds | Suisse

Introducción

Este documento proporciona la información necesaria para el uso de RINSE ® con los analizadores automáticos del analizador de hematología tipo MS4 y MS9 fabricados por MELET SCHLOESING Laboratories.

Este documento se proporciona en formato electrónico (e-ifu), utilizando la siguiente URL:
<http://www.mslabos.com/infos>

 **ADVERTENCIA** Este manual del usuario contiene información importante sobre el uso seguro del RINSE ®. Lea este documento en su totalidad antes de usar el producto.

Identificación del fabricante legal



Melet Schloesing Pharmaceuticals SA
Rue du Collège 90
CH-2300 La-Chaux-de-Fonds
Suisse
Tél : +41 (0)32 969 10 00
Fax : +41 (0)32 969 10 01



Melet Schloesing Pharmaceuticals | Rue du Collège 90 | CH-2300 La-Chaux-de-Fonds | Suisse

Designación del producto		Referencia del producto
RINSE®		RMSRINC2L0 RMSRINC500

Descripción
RINSE® es un agente de enjuague adecuado solo para analizadores de células sanguíneas MS4 de la marca MELET SCHLOESING Laboratories. Este reactivo permite el enjuague del aparato y la desalinización de las partes en contacto con el diluyente.
Contenido del kit
RINSE® se presenta en los siguientes formatos: a) Botella RMSRINC2L0 de 2 l b) RMSRINC500 botella de 500 ml.
Indicación de uso
RINSE® es un dispositivo de diagnóstico in vitro, diseñado para ser utilizado por profesionales de la salud y solo en combinación con los dispositivos de hematología conductimétrica de la gama MS4 fabricados por MELET SCHLOESING Laboratoires.
Uso esperado
El reactivo RINSE® es un agente de enjuague diseñado para mantener el dispositivo limpio.
Composición
RINSE® se compone de los siguientes elementos: • • Conservador (<1%)
Condiciones de almacenamiento - Periodo de validez - Estabilidad
RINSE® nunca debe someterse a temperaturas inferiores a 15 ° C y superiores a 25 ° C. RINSE® puede almacenarse durante 120 días (16 semanas) después de la apertura. RINSE® puede almacenarse durante 3 años (ver fecha de vencimiento en la etiqueta del producto) desde la fecha de fabricación.
Instalación
RINSE® está listo para usar y no requiere preparación. Una descripción detallada de la instalación / reemplazo del reactivo está disponible en la guía del usuario del analizador correspondiente.



Recolección y preparación de la muestra

Al recolectar la muestra de sangre, evite cualquier aspiración violenta para evitar el fenómeno de la hemólisis que podría influir en los resultados del análisis hematológico. También asegúrese de limitar el tiempo de muestreo para evitar problemas de microcoagulación.

La muestra de sangre a analizar debe recolectarse en un tubo de recolección que contenga anticoagulante EDTA K3. El uso del tubo de muestreo debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones del proveedor.

Conservación de muestras:

Las muestras de sangre entera son estables durante aproximadamente 4 horas a temperatura ambiente y 24 horas a 2-6°C.

La homogeneización suave y prolongada de la mezcla de sangre / anticoagulante es esencial antes de cualquier análisis, consulte las instrucciones del proveedor.

Se recomienda llevar a cabo el análisis no antes de los 30 minutos y, como máximo, 8 horas después de la recolección.

Principio de prueba

La combinación del reactivo RINSE® con los analizadores-analizadores MS4 de MELET SCHLOESING LABORATOIRES permite enjuagar las partes en contacto con un reactivo de sal como el diluyente.

Eliminación del producto

Respete el protocolo aplicado por su laboratorio para la neutralización y eliminación de residuos

Advertencias y precauciones

Precauciones:

- Usar solo para diagnósticos in vitro.
- Lea la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) antes de su uso.
- Siga todos los pasos preanalíticos en el laboratorio.
- Manipule los reactivos con cuidado para evitar la formación de burbujas.
- No lo use directamente después del transporte o directamente después de la manipulación. Asegúrese de que se alcancen las condiciones de temperatura de funcionamiento.

Advertencias:

- Los reactivos pueden causar irritación de los ojos, la piel y las membranas mucosas.
- En caso de contacto, enjuague con abundante agua y busque atención médica inmediata. En caso de ingestión accidental, llame a un médico de inmediato!
- Evite que partículas o bacterias entren en contacto con el reactivo.
- No use reactivos más allá de la fecha de caducidad o más allá del tiempo de botella abierta.
- Coloque los reactivos en la unidad principal del dispositivo.
- No transfiera / mezcle reactivos ya sean del mismo tipo o lote.
- No reutilice un contenedor vacío ya que esto puede distorsionar los resultados o dañar la máquina.
- No use el producto en caso de deterioro del embalaje protector.
- Si un reactivo se derramó accidentalmente, límpielo inmediatamente con un paño húmedo.
- No use el producto si hay algún signo de deterioro (turbidez, cambio de color, etc.)