



Melet Schloesing Pharmaceuticals | Rue du Collège 90 | CH-2300 La-Chaux-de-Fonds | Suisse

Instrucciones de uso

TRANSFLUX[®]

Explicación de símbolos

	Catálogo de referencia
	Fecha de caducidad
	Número de lote
	fabricante
	Consulte las instrucciones de uso
	Cumplimiento de la Directiva Europea 98/79 / CE
	Cuando está seguido de " ADVERTENCIA ", este símbolo significa "¡Atención! De lo contrario, pueden producirse resultados erróneos de examen y / o degradación del dispositivo. "
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Proteger del sol
	Mantener alejado de la humedad
	Límites de temperatura (inferior y superior)



Melet Schloesing Pharmaceuticals | Rue du Collège 90 | CH-2300 La-Chaux-de-Fonds | Suisse

Introducción

Este documento proporciona la información necesaria para el uso de TRANSFLUX ® con los analizadores automáticos del analizador de hematología tipo MS4 y MS9 fabricados por MELET SCHLOESING Laboratories.

Este documento se proporciona en formato electrónico (e-ifu), utilizando la siguiente URL:
<http://www.mslabos.com/infos>



ADVERTENCIA Este manual del usuario contiene información importante sobre el uso seguro del TRANSFLUX ®. Lea este documento en su totalidad antes de usar el producto.

Identificación del fabricante legal



Melet Schloesing Pharmaceuticals SA
Rue du Collège 90
CH-2300 La-Chaux-de-Fonds
Suisse
Tél : +41 (0)32 969 10 00
Fax : +41 (0)32 969 10 01

Designación del producto		Referencia del producto
TRANSFLUX®		3MSR0227 RMSTFLX1L0 RMSTFLX500

Descripción
TRANSFLUX® es un agente de limpieza activo y pasivo debido a su detergente y componentes enzimáticos
Contenido del kit
El TRANSFLUX® se presenta en los siguientes formatos: a) Una caja de cartón que contiene una bolsa de plástico de 5 l de reactivo. b) 1 litro de botella de reactivo c) Una botella de reactivo de 500 ml
Indicación de uso
TRANSFLUX® es un dispositivo de diagnóstico in vitro diseñado para ser utilizado por profesionales de la salud y solo en combinación con los dispositivos de hematología conductimétrica de la gama MS4 y MS9 fabricados por MELET SCHLOESING Laboratories.
Uso esperado
El reactivo TRANSFLUX® es un agente de limpieza utilizado para limpiar parte de los tanques y contar los agujeros.
Composición
El TRANSFLUX® se compone de los siguientes elementos: • Enzima proteolítica (<1%) • Detergente no iónico (<1%) • Alcohol desnaturalizado (<3%) • Tinte • Conservador
Condiciones de almacenamiento - Periodo de validez - Estabilidad
TRANSFLUX® nunca debe someterse a temperaturas inferiores a 15 ° C y superiores a 25 ° C. TRANSFLUX® puede almacenarse durante 120 días (16 semanas) después de la apertura. TRANSFLUX® puede almacenarse durante 3 años (ver fecha de caducidad en la etiqueta del producto) a partir de la fecha de fabricación
Instalación
TRANSFLUX® está listo para usar y no requiere preparación. Una descripción detallada de la instalación / reemplazo del reactivo está disponible en la guía del usuario del analizador correspondiente.



Recolección y preparación de la muestra

Al recolectar la muestra de sangre, evite cualquier aspiración violenta para evitar el fenómeno de la hemólisis que podría influir en los resultados del análisis hematológico. También asegúrese de limitar el tiempo de muestreo para evitar problemas de microcoagulación.

La muestra de sangre a analizar debe recolectarse en un tubo de recolección que contenga anticoagulante EDTA K3. El uso del tubo de muestreo debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones del proveedor.

Conservación de muestras:

Las muestras de sangre entera son estables durante aproximadamente 4 horas a temperatura ambiente y 24 horas a 2-6°C.

La homogeneización suave y prolongada de la mezcla de sangre / anticoagulante es esencial antes de cualquier análisis, consulte las instrucciones del proveedor.

Se recomienda llevar a cabo el análisis no antes de los 30 minutos y, como máximo, 8 horas después de la recolección.

Principio de prueba

La combinación de TRANSFLUX® con los analizadores-analizadores MS4 y MS9 de MELET SCHLOESING LABORATOIRES hace posible la limpieza de algunas partes de los elementos de conteo esenciales.

La acción de TRANSFLUX® opera en dos modos:

- La acción de un detergente
- La acción de una enzima proteolítica

Eliminación del producto

Respete el protocolo aplicado por su laboratorio para la neutralización y eliminación de residuos

Advertencias y precauciones

Precauciones:

- Usar solo para diagnósticos in vitro.
- Lea la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) antes de su uso.
- Siga todos los pasos preanalíticos en el laboratorio.
- Manipule los reactivos con cuidado para evitar la formación de burbujas.
- No lo use directamente después del transporte o directamente después de la manipulación. Asegúrese de que se alcancen las condiciones de temperatura de funcionamiento.

Advertencias:

- Los reactivos pueden causar irritación de los ojos, la piel y las membranas mucosas.
- En caso de contacto, enjuague con abundante agua y busque atención médica inmediata. En caso de ingestión accidental, ¡llame a un médico de inmediato!
- Evite que partículas o bacterias entren en contacto con el reactivo.



Melet Schloesing Pharmaceuticals | Rue du Collège 90 | CH-2300 La-Chaux-de-Fonds | Suisse

- No use reactivos más allá de la fecha de caducidad o más allá del tiempo de botella abierta.
- Coloque los reactivos en la unidad principal del dispositivo.
- No transfiera / mezcle reactivos ya sean del mismo tipo o lote.
- No reutilice un contenedor vacío ya que esto puede distorsionar los resultados o dañar la máquina.
- No use el producto en caso de deterioro del embalaje protector.
- Si un reactivo se derramó accidentalmente, límpielo inmediatamente con un paño húmedo.
- No use el producto si hay algún signo de deterioro (turbidez, cambio de color, etc.)

Cambio de rendimiento

Las siguientes sustancias pueden interferir con los resultados del análisis:

- Sueros altos en lactosa.
- Sueros hemolizados